

PRÉ - REQUISITOS

OBRIGATÓRIOS:



+



Escaneamento intraoral ou do modelo de gesso

Foto

OPCIONAIS:


- O Smile Design 2D não é um pré-requisito obrigatório, no entanto, **pode ser utilizado como guia para o planejamento 3D. O envio do Smile Design 2D não descarta os pré requisitos obrigatórios.**
- Escaneamento intraoral do mockup motivacional em boca com as modificações sugeridas no projeto inicial.
- Vídeo das principais queixas do paciente, que mostre movimentações reais de lábios e exposição dos dentes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- Quais dentes serão incluídos no planejamento?
- As alterações ocorrerão somente nos dentes ou dentes + gengiva?
- Informações relevantes para o planejamento.

SMILE DESIGN | DVI

IDEAL

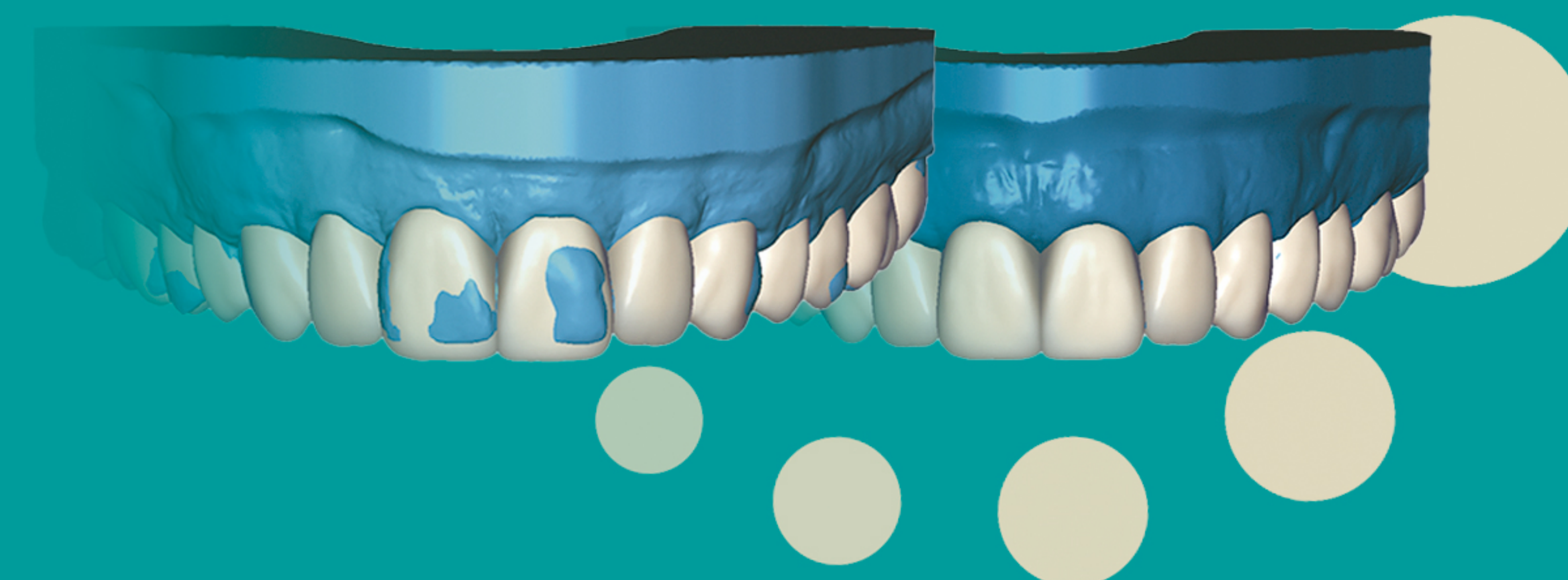

O que é?

É um planejamento ideal da **posição final dos dentes em casos de reabilitações de arcos superiores** com facetas ou lentes de contato.

Esse planejamento gera dois modelos digitais, o modelo **pré-preparo** e o **pós-preparo**, sendo eles responsáveis pela excelência no planejamento e previsibilidade do tratamento.

Objetivos:

- Provar o **planejamento digital na boca do paciente** e essa prova servir como guia de desgaste, afim de evitar remoções desnecessárias do remanescente dental.
- Confeccionar guia de silicona para conferência de preparos.
- Fazer provisório imediato, pós-preparo.
- Checar todos os parâmetros desejados para a prótese final.

SMILE DESIGN • IDEAL

1 EXAMES INICIAIS:

O grande diferencial do **Smile Design DVI** é a possibilidade de desenhar o sorriso do paciente levando em consideração a face, através do alinhamento das fotos e escaneamento intraoral




2 PLANEJAMENTO:

Os cirurgiões-dentistas solicitantes tem à disposição uma equipe de profissionais especializados em planejamento digital, assim como a possibilidade de participar ativamente do processo de desenho do sorriso, através de acesso remoto on-line.

Contato para suporte técnico:
(16) 3505 - 6739


O **Smile Design Motivacional** contemplado nesse produto tem grande importância para a previsibilidade do caso, pois as referências estabelecidas por ele durante a Prova de Mockup em boca serão utilizadas como guias para a posição e anatomia final dos dentes durante o planejamento **Smile Design Ideal**.

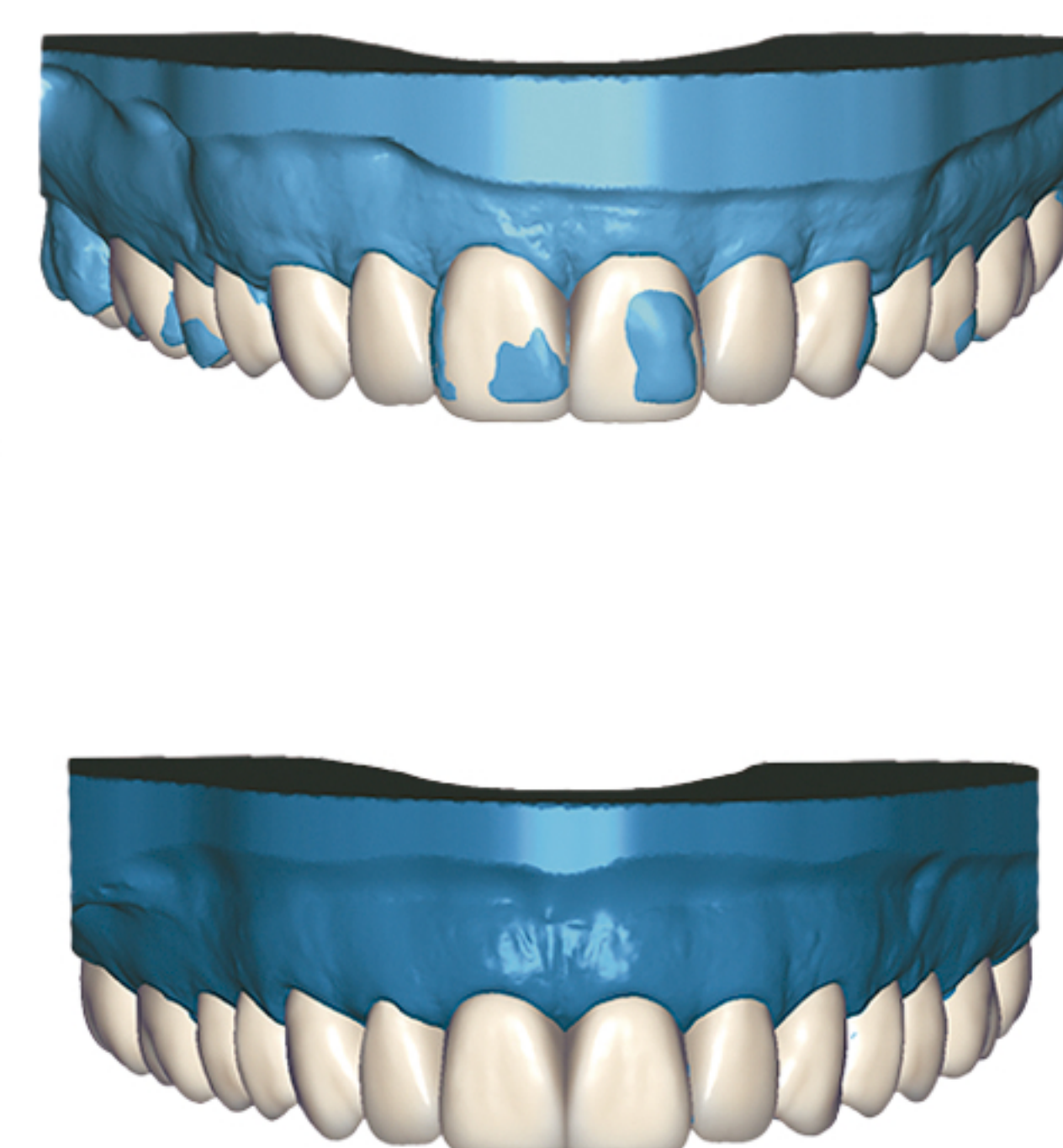

3 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO:


Os planejamentos serão enviados via e-mail, no formato de uma apresentação (PDF) contendo o estudo do caso, juntamente aos arquivos STL (modelo digital do planejamento) e HTML (arquivo para visualização do planejamento 3D em software gratuito).

É necessário aprovar o planejamento por e-mail, para assim seguir para a próxima etapa.

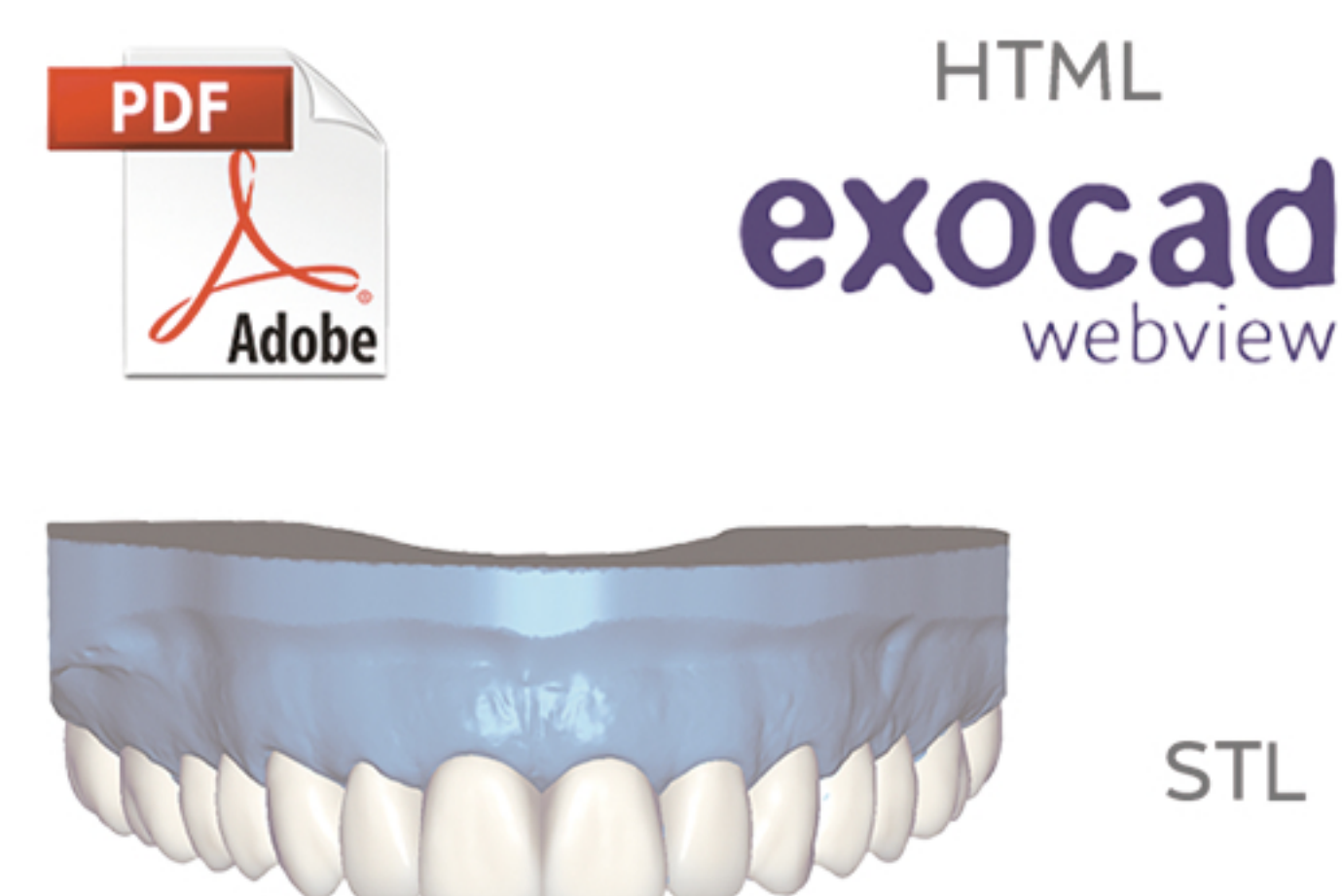

4 SOLICITAÇÃO DE MODELO IMPRESSO E GUIA PARA MOCKUP:

Após aprovação final do projeto por e-mail, é necessário solicitar a impressão do modelo e/ou guia para mockup junto à **central de planejamento**. Em casos de **Smile Design Ideal** deve-se solicitar a impressão do modelo pré-preparo e pós-preparo para maior previsibilidade do tratamento e precisão nos desgastes dentais.

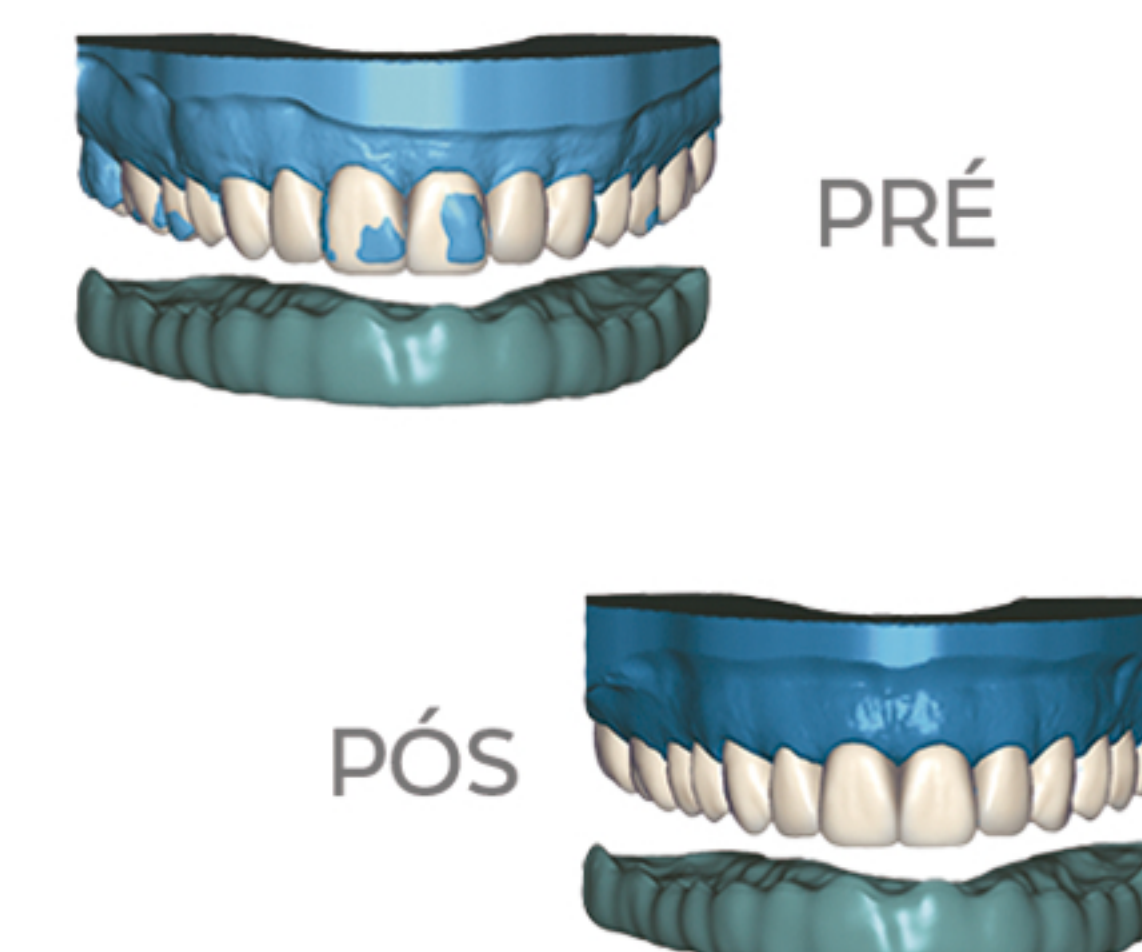

5 PROVA DO MOCKUP EM BOCA:

O **MODELO IDEAL PRÉ-PREPARO** gera um mockup que serve como guia de desgaste, pois contempla a anatomia original dos dentes e a anatomia final planejada.

O **MODELO IDEAL PÓS-PREPARO** gera uma guia de silicone utilizada na conferência dos preparos que também serve para a confecção do provisório imediato.

Após o preparo dos dentes com o auxílio do mockup produzido a partir do modelo ideal pré-preparo, e conferências dos desgastes realizados com a guia de silicone obtida a partir do modelo ideal pós-preparo, o cirurgião-dentista deve fazer o escaneamento ou moldagem dos preparos.

Em seguida, deve ser produzido o provisório imediato. Esse provisório é obtido a partir da guia de silicone que reproduz a anatomia dos dentes do modelo ideal pós-preparo, que contempla todas as características das facetas definitivas. Sendo assim, o cirurgião-dentista deve avaliar se o provisório imediato está de acordo com as expectativas do tratamento. Caso seja necessária alguma modificação, ela deve ser feita e realizado um novo escaneamento ou moldagem que servirá de referência no momento do desenho das facetas definitivas.

