

PRÉ - REQUISITOS

OBRIGATÓRIOS:



+



Escaneamento intraoral ou
do modelo de gesso

Foto

OPCIONAIS:


- O Smile Design 2D pode ser utilizado como guia para o planejamento 3D. **O envio do Smile Design 2D não descarta os pré-requisitos obrigatórios.**
- Vídeos das principais queixas do paciente, que mostre movimentações reais dos lábios e exposição dos dentes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- Quais dentes serão incluídos no planejamento?
- As alterações ocorrerão somente nos dentes ou dentes + gengiva?
- Informações relevantes para o planejamento.

SMILE DESIGN | DVI

MOTIVACIONAL

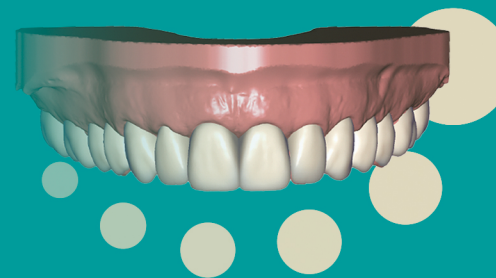

O que é?

É o primeiro estudo 3D do sorriso, realizado na arcada **SUPERIOR**, a partir da sobreposição de uma nova anatomia aos dentes presentes, antes de qualquer desgaste. O nome “**MOTIVACIONAL**” é dado por ser o primeiro desenho do sorriso aprovado clinicamente (através do uso de mockup), capaz de motivar o paciente a aderir o tratamento.

Objetivos:

- Provar o **planejamento digital na boca do paciente, sem desgaste dental.**
- Determinar o **formato e comprimento** dos dentes superiores.
- Avaliar a **curva de Spee e linha média** sugerida no planejamento digital.
- **Gerar referências para as próximas etapas** do fluxo digital (Smile design Ideal e/ou Funcional).

SMILE DESIGN • MOTIVACIONAL

1 EXAMES INICIAIS:

O grande diferencial do **Smile Design DVI** é a possibilidade de desenhar o sorriso do paciente levando em consideração a face, através do alinhamento das fotos e escaneamento intraoral.



Escaneamento intraoral ou do modelo de gesso

Foto

2 PLANEJAMENTO:

Os cirurgiões-dentistas solicitantes tem à disposição uma equipe de profissionais especializados em planejamento digital, e contam também com a possibilidade de alterações do planejamento caso haja necessidade.

Contato para suporte técnico:
(16) 3505 - 6739



3 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO:

Os planejamentos serão enviados via e-mail, no formato de uma apresentação (PDF) contendo o estudo do caso, juntamente aos arquivos STL (modelo digital do planejamento) e HTML (arquivo para visualização do planejamento 3D em software gratuito). É necessário aprovar o planejamento por e-mail, para assim seguir para a próxima etapa.




HTML
exocad
webview



4 SOLICITAÇÃO DE MODELO IMPRESSO E GUIA PARA MOCKUP:


Após aprovação final do projeto por e-mail, é necessário solicitar a impressão do modelo e/ou guia para mockup junto à **central de planejamento**.

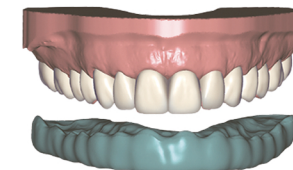

5 PROVA DO MOCKUP EM BOCA:


Com o auxílio da guia de mockup produzida a partir do modelo impresso, é possível produzir o **mockup motivacional**. O cirurgião-dentista deve testar clinicamente as modificações sugeridas pelo planejamento digital.

- **Por ser a sobreposição de uma nova anatomia aos dentes presentes, antes de qualquer desgaste, espera-se um volume maior dos dentes durante a prova e estreitamento do corredor bucal.**
- **Em casos de dentes muito vestibularizados é possível que o resultado estético da prova do mockup seja prejudicado.**
- **APROVADO CLINICAMENTE ✓**
Fazer o upgrade para o **Smile Design Ideal** (casos de facetas em dentes superiores) ou **Funcional** (casos envolvendo dentes inferiores e/ou coroas superiores e inferiores e/ou necessidade de alteração de DVO).
- **NÃO APROVADO ⊗**

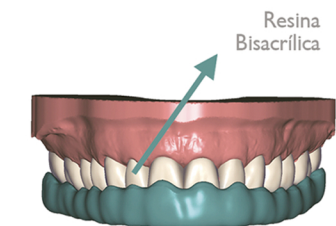

Formato e comprimento dos dentes

AVALIAR

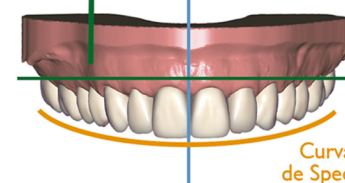

Linha média

Curva de Spee

Fazer as modificações necessárias no mockup em boca e escanear ou moldar o paciente. Esse escaneamento ou moldagem servirá como referência para o novo desenho do sorriso e confecção de outro modelo impresso (cobrado a parte) para nova prova de mockup, de acordo com as alterações sugeridas.